

QUICKVUE®

RSV TEST
Respiratory Syncytial Virus

QuickVue RSV 20 Test Kit Katalog #20193 Zugelassen von der FDA (U.S. Food and Drug Administration) CE

Einfach-Richtig-Schnell!

Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) gehört zur Familie der Paramyxoviridae (Genus Pneumovirus) und ist der bedeutendste Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. "Die Vermehrung des RSV erfolgt auf den Schleimhäuten der Atemwege, deren zilientragendes Epithel durch die Synzytiumbildung und die körpereigene Immunreaktion vorübergehend zerstört wird."⁽¹⁾ RSV ist nach Rhinoviren der zweit häufigste Erreger einer Lungenentzündung bei Kleinkindern. "Zur Krankenseinweisung führen neben einer Lungenentzündung auch eine obstruktive Bronchitis/Bronchiolitis; Atemstillstand kann insbesondere bei Frühgeborenen das vorherrschende Symptom sein. Vereinzelt kann eine RSV Infektion sogar tödlich enden."⁽²⁾



"Eine "klassische" RSV-Symptomatik existiert nicht. Die Diagnose kann nicht allein aus dem klinischen Bild gestellt werden, da RSV ein weites Spektrum respiratorischer Erkrankungen verursachen".⁽¹⁾

Der schnelle und direkte Nachweis von RSV ist für das Hygienemanagement und die Patientenbehandlung von grosser Bedeutung. Der QuickVue RSV ist ein Test, der Ihnen bei der Diagnose von RSV Infektionen helfen kann – Einfach-Richtig-Schnell!

- 1) Respiratory Syncytial Viren (RSV); RKI-Ratgeber Infektionskrankheiten – Merkblätter für Ärzte 2004
http://www.rki.de/clin_049/nn_196658/DE/Content/Infekt/EpidBull/
- 2) Erreger-Steckbriefe; PID-ARI.net 2004; http://www.pid-ari.net/RL_Erreger/Erreger_index.htm

Schnelle Diagnose und Behandlung

- Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten.

Zuverlässiger Nachweis

- Zuverlässiger RSV Nachweis bei Verwendung verschiedener Probenmaterialien:
- 99%-ige Sensitivität bei Nasenrachenaspirat.
- 92%-ige Sensitivität bei Nasenrachentupfer.
- 83%-ige Sensitivität bei Nasen-/Nasenrachenspülung.

Einfache Durchführung

- Teststreifen-Format.
- 3-Schritt-Verfahren/ nur 30 Sekunden zur Testdurchführung.
- 1 Reagenz.
- Einfaches Ablesen und Auswerten der Resultate durch 2-farbige Ergebnisanzeige.

Vorteile des QuickVue RSV Tests

- Hohe Sensitivität und Spezifität (Details siehe Rückseite).
- Komplettes Testbesteck in jeder Packung enthalten, inklusive Nasenrachentupfer, positives und negatives Kontrollmaterial.
- Lagerung bei Raumtemperatur mit 24 Monate Haltbarkeit ab Produktion.
- Zur Anwendung bei Patienten bis zu 18 Jahren
- Bei gemeinsamer Anwendung mit einem QuickVue Influenza Test kann eine Patientenprobe zur Durchführung beider Tests ausreichend sein. Die Vermeidung multipler Probeentnahmen ist patientenfreundlich und erspart zudem wertvolle Zeit.
- Synagis zeigt keine Interferenzen mit dem QuickVue RSV Test.


QUIDEL®

C O R P O R A T I O N

Für weitere Informationen zum QuickVue RSV10 Test, besuchen Sie bitte unsere Webseite, rufen Sie uns unter 001 858 552 1100 an oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

Quidel Corporation • Weltweite Firmenzentrale • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • quidel.com

Verfahren bei Verwendung von Nasenrachenaspirat und Nasen-/Nasenrachenspülung:

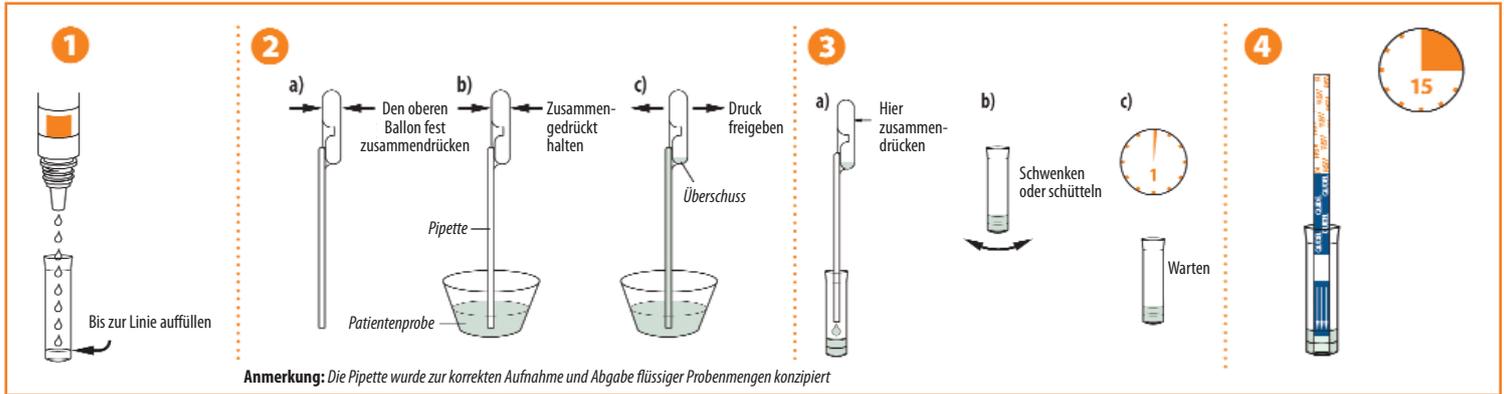


Nasenrachenaspirat:

Sensitivität: 99% Spezifität: 92% Genauigkeit: 94%

Nasen-/Nasenrachenspülung:

Sensitivität: 83% Spezifität: 90% Genauigkeit: 87%


Verfahren bei Verwendung von Nasenrachentupfer:

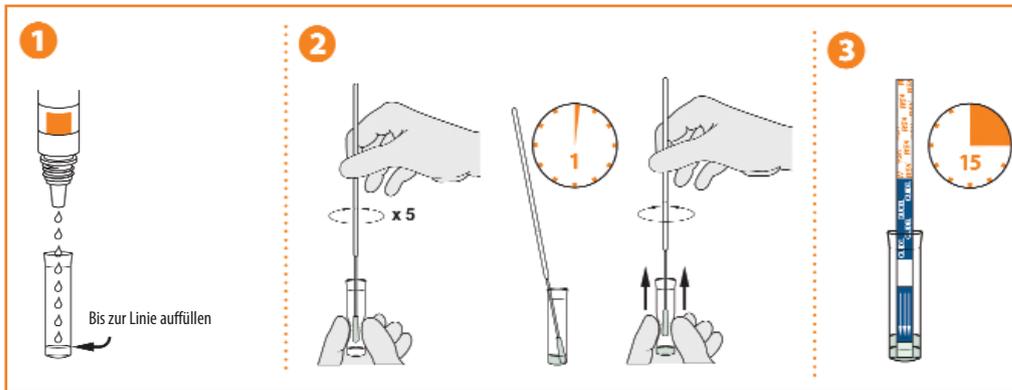

Nasenrachentupfer:

Sensitivität: 92% Spezifität: 92% Genauigkeit: 92%

Ergebnisse:

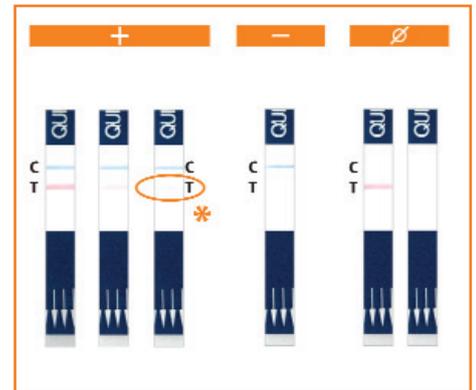

* Jegliche, noch so schwache rosa Linie wird als positives Testresultat interpretiert.

Die erzielten Testeigenschaften eines jeden RSV Tests sind abhängig von der Probenahme, der Probenbehandlung und der Befolgung der Packungsbeilage. Besuchen Sie unsere Webseite unter www.Quidel.com für weitere Informationen zum QuickVue RSV Test.



QUIDEL[®]
CORPORATION

Für weitere Informationen zum QuickVue RSV10 Test, besuchen Sie bitte unsere Webseite, rufen Sie uns unter 001 858 552 1100 an oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

Quidel Corporation ▶ Weltweite Firmenzentrale ▶ 10165 McKellar Court ▶ San Diego, CA 92121 USA ▶ quidel.com

Ihr Ansprechpartner: