

Schnellstartanleitung

OPTI* CCA-TS2

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres **OPTI CCA-TS2**! Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, wählen Sie einen für die Probenentnahme geeigneten Standort. Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage mit ausreichender Arbeitsfläche in Steckdosennähe. Gerät nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und von elektromagnetischen Feldern fernhalten. Umgebungstemperatur: 10-30°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit: 95%.

1

- a. Netzgerät anschließen** - Schließen Sie das Netzteil über die Anschlussbuchse auf der linken Seite an das Gerät an. Stecken Sie das Stromkabel ins Netzteil und in die Steckdose.
- b. Batterie installieren** - Schieben Sie die Batterie in das Fach auf der linken Seite.
- c. Strom einschalten**



2

- a. Druckerpapier einlegen** - Drücken Sie auf die rote Entriegelungstaste der Druckerklappe zum Öffnen des Druckerfachs. Legen Sie das Druckerpapier in die Papierschale ein und ziehen Sie das Ende der Rolle aus der Papierschale heraus. Schließen Sie die Klappe.




3

- a. Gasflasche vorbereiten** - Drücken Sie **<Neue Gasflasche>**. Schrauben Sie die Verschlusskappe der Flasche ab und scannen Sie den Barcode. Halten Sie hierzu den Barcode auf der Packungsbeilage in einem Abstand von 5-8 cm vor den Barcode-scanner auf der rechten Seite des Gerätes. Der Barcode kann auch manuell eingegeben werden.
- b. Gasflasche installieren** - Nach Aufforderung schrauben Sie die Flasche im Uhrzeigersinn ins Gehäuse und drücken auf **<OK>**. Der OPTI CCA-TS2 beginnt dann mit der Aufwärmphase und führt danach eine Gasspülung durch. Nach Beendigung des Vorgangs erscheint die **<Bereit>**-Anzeige.



4

- a. tHb-Kalibrierung** - In der **<Bereit>**-Anzeige scannen Sie den unteren Barcode der Kalibrierkassette und folgen den Bildschirm-anweisungen.

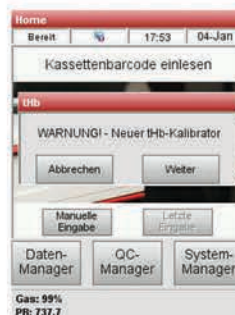

5

- a. SRC-Messungen** - Vor Beginn der Patientennmessungen sollten 2 Level der Standardreferenzkassette (SRC) gemessen werden. In der **<Bereit>**-Anzeige scannen Sie den unteren SRC-Barcode und folgen den Bildschirmanweisungen.



Zusätzliche Hinweise und Tipps

OPTI* CCA-TS2



Hinweise und Tipps zur Inbetriebnahme

- ▶ Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des OPTI CCA-TS2 beginnen, überprüfen Sie die Lieferverpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Inhalts.

Die Lieferverpackung enthält:

- Netzteil und Netzkabel
- Batterie
- Stylus-Stift
- Thermodruckerpaar (HP0070)
- Eine multi-level Standardreferenzkassette (SRC)
- Eine tHb Kalibrierkassette

Hinweis: Die multi-level SRC-Kassette und die tHb Kalibrierkassette befinden sich im Aufbewahrungsfach auf der Rückseite des OPTI CCA-TS2. Der Barcode beider Kassetten kann direkt vom Hauptmenü (Messbereit) aus gescannt werden.

- ▶ Zusätzlich benötigte Artikel, die nicht in der Verpackung enthalten sind:
 - OPTI Check und OPTI Check + (für Glucose oder BUN-Kassetten)
 - Niederdruck-Gasflasche (BP7162)
 - OPTI Sensorkassetten
- ▶ Der OPTI CCA-TS2 muss für die Messung von B-Lac Kassetten eingestellt werden. Ein kostenloses B-Lac EinstellungsKit (BP7657) ist über den Kundendienst erhältlich. Informationen zur B-Lac-Einstellung finden Sie in Abschnitt 8.2.20 der Gebrauchsanweisung.

Bildschirmsymbole

	Home		Drucken
	Vorheriges Menü		Wählen
	Zurück		Alle wählen
	Weiter		Bild auf
	Löschen		Bild ab
	Speichern		Exportieren
	Bearbeiten		Abbrechen
	Hinzufügen		Abmelden
	Ansehen		

Weitere Hinweise und Tipps

- ▶ Im OPTI CCA-TS2 wird eine spezielle Niederdruck-Gasflasche mit roter Endkappe verwendet. Andere OPTI Gasflaschen sind im OPTI CCA-TS2 nicht verwendbar.
- ▶ QC-Sperren sind in der Werkseinstellung aktiviert. Hinweise zur Deaktivierung dieser Einstellungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.