
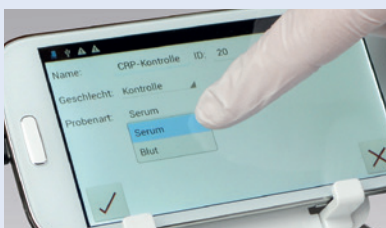


Eurolyser CUBE CRP – Externe Qualitätskontrolle

Arbeitsanweisung

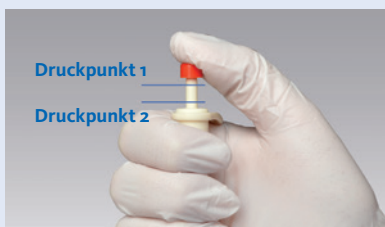

1. Ringversuchsmaterial 30 min vor Beginn der Messung aus der Kühlung nehmen und auf Raumtemperatur bringen.

2. Im weiteren Verlauf NICHT die integrierte Kapillare, sondern eine Pipette zur Probendosierung verwenden. Kolben der Pipette ausserhalb des Ringversuchsgefässes bis zum **ersten Druckpunkt** drücken und halten.

3. Pipettenspitze in Lösung eintauchen und 5 µl Probeflüssigkeit aufnehmen. Hierzu Kolben langsam in Ausgangsstellung zurückkehren lassen.

Zu tiefes Eintauchen der Pipettenspitze in die Probe verfälscht Volumen & Ergebnis!

4. Pipettenspitze in die Messflüssigkeit der Küvette eintauchen. Probenvolumen auswerfen durch Drücken des Kolbens bis zum **zweiten Druckpunkt**.

Pipettenspitze aus der Flüssigkeit nehmen, erst dann den gedrückten Kolben loslassen.

5. Küvette fest verschliessen und wie gewohnt in das Gerät einstellen. Messeinstellungen wie folgt wählen:

Geschlecht: Kontrolle

Probenart: Serum


Starten der Messung durch Schliessen der Tür.

Bei Fragen zum Ringversuch unterstützen wir Sie gerne.

Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere **Reflexline, Tel. 0848 80 38 38**

Eurolyser smart CRP – Externe Qualitätskontrolle

Arbeitsanweisung

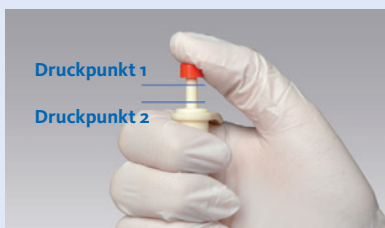

1. Ringversuchsmaterial 30 min vor Beginn der Messung aus der Kühlung nehmen und auf Raumtemperatur bringen.

2. Im weiteren Verlauf NICHT die integrierte Kapillare, sondern eine Pipette zur Probendosierung verwenden. Kolben der Pipette ausserhalb des Ringversuchsgefäßes bis zum **ersten Druckpunkt** drücken und halten.

3. Pipettenspitze in Lösung eintauchen und 5 µl Probeflüssigkeit aufnehmen. Hierzu Kolben langsam in Ausgangsstellung zurückkehren lassen.

Zu tiefes Eintauchen der Pipettenspitze in die Probe verfälscht Volumen & Ergebnis!

4. Pipettenspitze in die Messflüssigkeit der Küvette eintauchen. Probenvolumen auswerfen durch Drücken des Kolbens bis zum **zweiten Druckpunkt**.

Pipettenspitze aus der Flüssigkeit nehmen, erst dann den gedrückten Kolben loslassen.

5. Küvette fest verschliessen und Messeinstellungen wie folgt wählen:

Geschlecht: Kontrolle

Probenart: Serum

Messeinstellungen mit bestätigen und nach Einsetzen der Küvette drücken.

Bei Fragen zum Ringversuch unterstützen wir Sie gerne.

Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere **Reflexline, Tel. 0848 80 38 38**